



SERVER

Manuale d'uso



CE

Intimax
excellence in wellness

Intimax srl – Via R. Bitti, 24 - 20125 Milano

tel. +39 02 64 20 047 r.a. – fax +39 02 66 10 38 09 – e-mail: info@intimax.it

www.intimax.it

Società soggetta a direzione e coordinamento Bi international S.p.A.

1 Informazioni generali

Cari Clienti,

il manuale d'uso contiene la descrizione del dispositivo medico e importanti guide per assicurare la correttezza e la sicurezza del prodotto. È importante leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo. È soprattutto importante leggere e seguire i requisiti di sicurezza.

REHASENSE migliora continuamente i propri prodotti e si riserva il diritto di cambiare le specifiche e le funzioni senza preavviso.

2 utilizzo previsto, indicazioni & controindicazioni

Uso previsto: Il deambulatore è stato progettato come dispositivo per assistere le persone con problemi di mobilità, ad esempio per mantenere la posizione eretta, oppure durante la camminata o mentre ci si siede.

Indicazioni: il dispositivo è progettato per gli individui che, a causa di diversi problemi di salute necessitano di un supporto stabile durante la deambulazione.

Controindicazioni: il dispositivo non deve essere utilizzato dagli individui che hanno seri problemi con il bilanciamento del corpo o la cui forza muscolare è troppo debole per sostenerli durante la camminata o la posizione eretta, anche con il supporto del deambulatore. La necessità di utilizzo del deambulatore deve essere sempre indicata dal dottore o dal fisioterapista.

3 Consegna & descrizione generale del prodotto

I deambulatori sono forniti chiusi in scatole per garantire un facile trasporto

Contenuto:

1 deambulatore ripiegato

1 manuale d'uso

Il Router è un deambulatore stabile a 4 ruote richiudibile. La struttura è in alluminio, leggero e facile da trasportare ed immagazzinare. Il deambulatore è facilmente manovrabile e con l'altezza regolabile. Il prodotto consiste in una struttura in alluminio a tubi tondi, equipaggiato di una seduta in tessuto e una borsa da shopping.

4 requisiti di sicurezza

Assicurarsi che il questo manuale venga letto da tutti gli utenti che utilizzano il dispositivo. Il fabbricante non si assume nessuna responsabilità per danni e/o infortuni causati dal fatto che l'utente non abbia seguito il manuale d'uso.



Limitazioni d'utilizzo

- Il dispositivo non deve essere caricato con più di 150 kg
- la borsa del dispositivo ha un carico massimo di 5 kg
- il dispositivo è stato creato per l'utilizzo negli spazi interni o esterni su una superficie liscia
- il dispositivo non è da intendersi semovente quando l'utente è seduto
- i freni DEVONO essere nella posizione di fermo PRIMA che l'utente si sieda.



Evitare incidenti


- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo cui è destinato
- Utilizzare il dispositivo solo quando in buone condizioni
- Evitare di effettuare modifiche al dispositivo, a meno che abbiate l'accettazione scritta dal fabbricante
- Durante la regolazione del dispositivo, l'utente deve prestare attenzione a non intrappolare le dita o parti del corpo tra le due parti mobili
- Tutte le ruote devono essere in contatto con il pavimento ogni momento durante l'utilizzo, di modo che il deambulatore sia propriamente bilanciato e si evitano incidenti
- Quando si utilizza il deambulatore in posizione stazionaria, i freni DEVONO essere bloccati.



Mind Your Fingers

Attenzione! Le dita o altri parti del corpo dell'utente o dell'assistente possono venire intrappolati tra le parti mobili del dispositivo durante l'apertura, la chiusura o la regolazione del dispositivo. Prestare estrema attenzione quando si regola il dispositivo.

5 dettagli del prodotto

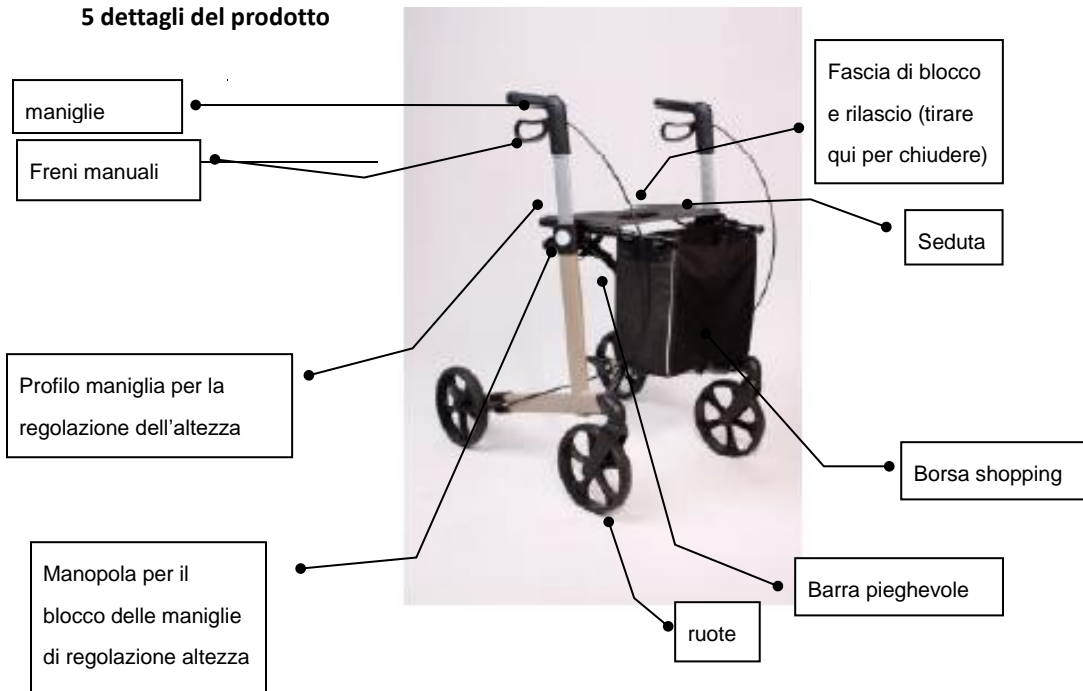

6 utilizzo

Osservando l'immagine sopra il deambulatore dovrebbe essere pronto per l'uso alla consegna. Comunque vi raccomandiamo di seguire i seguenti passi:

Controllo iniziale

- In un primo momento, non appena sballato il prodotto dalla scatola, assicurarsi che nessuna parte è mancante. Se notate che qualche parte è mancante o danneggiata, non continuare con il montaggio del prodotto. Contattare il fornitore immediatamente.

Apertura del deambulatore

- Premere il pulsante rosso che tiene chiuse le barre della seduta
- Tenere le due barre della seduta e spingerle in giù simultaneamente fino a

che non si sente un “click” del meccanismo della struttura. Provare a tirare i tubi della seduta in alto, se l’operazione è impossibile da attuare allora la struttura è aperta e correttamente in sicurezza. Guarda la figura del deambulatore aperto nell’immagine.



- Dopo l’apertura o il montaggio del deambulatore assicurarsi sempre che il supporto della seduta è bloccato in sicurezza e che la struttura non si muova.
- Assicurarsi sempre che entrambe le barre delle maniglie di spinta siano bloccate in modo sicuro nel tubo di supporto principale per evitare lo scorrimento accidentale delle barre delle maniglie.
- Verificare sempre che gli accessori siano posizionati al loro posto prima dell’utilizzo
- La non verifica dei seguenti avvertimenti può portare a lesioni personali

Chiusura

- Per ripiegare il deambulatore tirare in alto la fascia della seduta
- Piegarlo il deambulatore fino a che la chiusura si blocca

Regolazione altezza delle maniglie di spinta

- Rilasciare la manopola di blocco maniglie
- Regolare l’altezza a vs. piacimento
- Stringere la manopola



- Entrambe le maniglie di spinta devono essere regolate alla medesima altezza
- La giusta altezza delle maniglie di spinta dovrebbe essere all’altezza delle anche
- Mai lasciare il dispositivo senza i freni azionati

Utilizzo dei freni

- PER FERMARE IL DEAMBULATORE tirare in sù i freni verso le maniglie
- PER RIMANERE IN POSIZIONE STAZIONARIA tenere i freni in sù
- PER MUOVERSI rilasciare i freni. I freni scenderanno automaticamente



- Assicurarsi che i freni siano azionati quando il deambulatore non è utilizzato
- mai lasciare il deambulatore senza freni azionati quando qualcuno è seduto
- non lasciare mai il deambulatore in pendenza senza i freni azionati!

Blocco/Sblocco dei freni

- Per bloccare i freni premere i freni verso il basso fino a che non si sente un “click”
- Per sedersi girarsi su sé stessi e sedersi
- Per sbloccare i freni tirare le maniglie dei freni all’insù fino a che li senti liberi



- quando si utilizza il deambulatore in posizione stazionaria, le maniglie dei freni devono essere sempre bloccati
- Quando ci si siede, non sedersi troppo in prossimità della parte frontale del deambulatore. (Non si dovrebbe sedere parzialmente sulla borsa)
- Sedersi sempre dritti, con gli avambracci o le mani sulle maniglie di spinta come appoggio
- non lasciare mai il deambulatore in pendenza senza i freni azionati!

7 Pulizia

In generale:

- Pulire il deambulatore regolarmente e tenere pulito
- In presenza di una leggera polvere, spolverare con un panno inumidito
- In presenza di grandi strati di polvere, pulire con acqua tiepida e un detersivo delicato e non corrosivo

- Non usare agenti abrasivi o detersivi con candeggina per non danneggiare o scolorire il deambulatore
- asciugare con un panno morbido

Ruote:

- Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo delicato. Asciugare con uno straccio pulito
- Lubrificare periodicamente con olio multiuso o quando le ruote incominciano a cigolare.

8 Etichetta

L'etichetta del prodotto è posizionata alla base di una barra della struttura:



9 Dati tecnici

SERVER - deambulatore leggero	
Carico max.	150 kg
Carico max. borsa	5 kg
Peso totale con accessori	7 kg & borsa 0,3 kg
lunghezza	68 cm
profondità	Aperto 60 cm/chiuso 24cm
Ampiezza seduta	60 cm
Altezza maniglie (regolabili)	S, M, L: 63-79; 66-86; 74-102 cm
Altezza seduta	S, M, L: 50, 55, 62 cm
Freni	2 freni con meccanismo di blocco

10 trasporto

Il deambulatore è un prodotto facile da richiudere e da trasportare. Raccomandiamo di richiudere il dispositivo come menzionato. Il dispositivo deve essere trasportato in modo tale che sia stabile e non ci sia nessun rischio di improvvisi e pericolosi movimenti del deambulatore.

11 Manutenzione

- Assicurarsi che ogni parte del deambulatore sia sicuro in ogni momento
- Controllare che tutte le viti e i dadi siano avvitati
- Sostituire immediatamente qualsiasi item danneggiato, rotto o indebolito

12 Riutilizzo

Il deambulatore può essere riutilizzato. Prima di essere utilizzato da un altro utente deve essere ispezionato dal distributore.

Verificare i seguenti punti:

- Ispezione della struttura
- Sicurezza dei dadi e dei bulloni della seduta
- Condizioni degli elementi in plastica
- Condizioni delle ruote e dei cuscinetti
- Efficienza e condizione dei freni

Sostituire gli elementi danneggiati o rotti con quelli nuovi. Si raccomanda di sostituire le ruote ogni qualvolta avvenga una modifica. Tutti i bulloni e le viti allentati devono essere avvitati. Il prodotto deve essere puliti a fondo prima del riutilizzo.

ATTENZIONE! È vietato riutilizzare il deambulatore quando la struttura è inclinata o rotta.

Il manuale d'uso deve essere incluso al deambulatore ad ogni modifica

13 Deposito del prodotto

Il dispositivo non dovrebbe essere depresso nella normale spazzatura. È consigliabile spedirlo alla stazione di deposito per il riutilizzo o il riciclo.

14 Garanzia

Il produttore offre 2 anni di garanzia per errori di produzione. La garanzia non è valida per il non appropriato utilizzo del prodotto.

Sistema di restituzione

Tutte le restituzioni richiedono una pre-autorizzazione da **INTIMAX Srl**