


KC45

Cuscino composito con base preformata e fluidi automodellanti



Destinazione d'uso:

Prevenzione delle piaghe da decubito

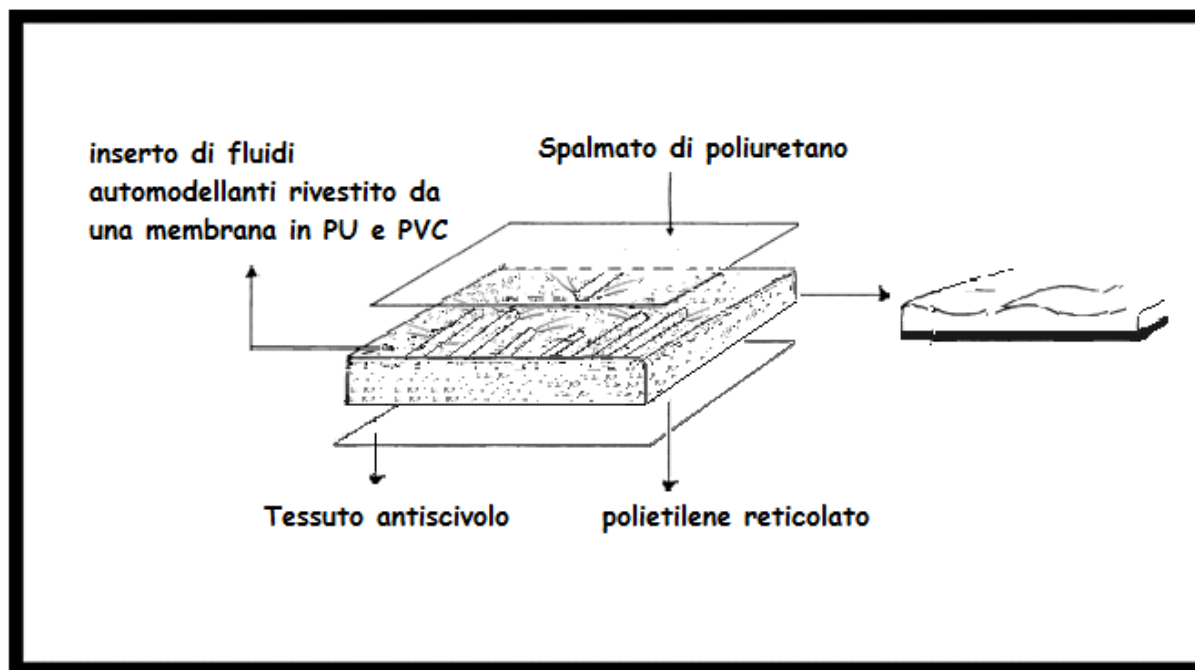

Modalità d'impiego:

Posizionare il dispositivo con la cerniera rivolta verso lo schienale della seduta e la parte antiscivolo (gommata) rivolta verso il basso. L'etichetta sul fodero segnala la parte posteriore del cuscino, mentre all'interno è presente l'indicazione della parte anteriore. Il cuscino va posizionato con la parte più morbida a contatto con l'utente e la base rigida rivolta verso la seduta (carrozzina).

Manutenzione e pulizia:

Si consiglia il lavaggio del fodero a mano con saponi neutri temperatura massima 60° C, o in lavatrice programma delicati.

La sacca interna può essere pulita con alcool.



Avvertenze e precauzioni:

- Si consiglia l'uso ad un solo utente.
- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il cuscino KC45 deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

Modalità di smaltimento:

KC45

**Cuscino composito con base preformata
e fluidi automodellanti**



Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.



Interno



Esterno

Codice e misure

| | larghezza | profondità | altezza ant. | altezza post. | peso | N° repertorio |
|-----------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| KC453838 | 38 cm | 38 cm | 8 cm | 6,5 cm | 1,9 kg | 1773644/R |
| KC454040 | 40 cm | 40 cm | 8 cm | 6,5 cm | 2,1 kg | 2058665/R |
| KC454045 | 40 cm | 45 cm | 8 cm | 6,5 cm | 2,1 kg | 2058666/R |
| KC454242 | 42 cm | 42 cm | 8 cm | 6,5 cm | 2,4 kg | 2058668/R |
| KC454442 | 44 cm | 42 cm | 8 cm | 6,5 cm | 2,5 kg | 2058670/R |
| KC454540 | 45 cm | 40 cm | 8 cm | 6,5 cm | 2,1 kg | 2058671/R |
| KC454545 | 45 cm | 45 cm | 8 cm | 6,5 cm | 2,8 kg | 2058672/R |
| KC454550 | 45 cm | 50 cm | 8 cm | 6,5 cm | 3,1 kg | 2058673/R |
| KC455045 | 50 cm | 45 cm | 8 cm | 6,5 cm | 3,1 kg | 2058678/R |