

Caratteristiche del Materasso

Specifiche

Peso Max paziente : 100~110 Kgs.
Dimensioni materasso : 200 x 90 cm.
Materiale : PVC atossico 0.4 mm. EN-71

Caratteristiche compressore

Specifiche:

Durata ciclo : 6 Mins.
Portata aria : 6 L/ Min.
Campo di pressione : 70~ 130 mmHg
Potenza elettrica : 220-240 Volts.
Protezione elettrica Class II Electric Shocks
Garanzia : 12 mesi

Prodotto per:

DEMARTA VIRGINIO Group ®
DEMARTA VIRGINIO SAS
Via Giuseppe Bozzalla n.20
13814 POLLONE (BI) Italy
Tel. (39)015.9555440 fax
(39)015.9555441
Info@demarta.com www.demarta.com



BUTTERFLY

USER'S MANUAL

MEDICAL ANTI-DECUBITUS SYSTEM

(Mattress with adjustable pump)



MODEL: 05.03.6600A2 + 05.03.BP2



Principi di funzionamento

- La pressione alternata è un valido sistema per evitare il decubito nelle persone costrette per lungo tempo distese a letto, che può indurre anche all'ipossia dell'epidermide
- La pressione alternate di adatta alla posizione anatomica del paziente

Linee guida per l'uso

- Il metodo tradizionalmente accettato di controllo della pressione è quello di girare il paziente a intervalli regolari e ad osservare regolarmente le aree di rischio.
- Il Materasso a pressione alternata ha lo scopo di interagire con questo trattamento e comunque il controllo dell'area a rischio del paziente deve essere considerata una prassi da effettuare regolarmente.

Considerazioni generali

- Consigliato per I pazienti che rimangono più di 15 ore al giorno distese nel letto.
- Consigliato per pazienti con classe a rischio di decubito medio/alta.

Uso / Installazione

- Aprire la confezione del sovrmaterasso e posizionarlo sul letto.
- Assicurare il sovrmaterasso al materasso sottostante, rimboccando i lembi alle estremità.
- Agganciare il compressore alla pediera del letto con gli appositi ganci.
- Collegare I tubi del materasso agli ugelli del compressore posti sul fianco.
- Collegare il cavo della corrente alla presa 200volt.
- Accendere il compressore con il tasto verde ON.
- Posizionare al massimo la manopola della regolazione e aspettare che il materasso sia completamente gonfio. (circa 20 minuti)
- Distendere il paziente sul materasso e regolare la pressione in

base alle indicazioni poste sul compressore.

Misure di sicurezza

- FARE ATTENZIONE quando il materasso è in funzione.
- NON LASCIARE IL COMPRESSORE collegato alla corrente quando non è in uso..
- NON ESPORRE il compressore ad eccessiva umidità.
- NON COPRIRE IL COMPRESSORE con coperte o altro di simile
- NON PULIRE COMPRESSORE E MATERASSO con detergenti aggressive o abrasivi
- NON SPOSTARE il materasso quando è collegato alla corrente elettrica.

Pulizia / Disinfezione

COMPRESSORE:

- ATTENZIONE. Spegner e staccare la spina prima di pulirlo
- UTILIZZARE uno straccio imbevuto di detergente neutro.
- DILUIRE il detergente secondo le istruzioni del fabbricante senza eccedere le indicazioni del produttore.

MATERASSO:

- Usare un detergente neutro, pulire imbevendo una spugna.
- Si può disinfettare con disinfettanti NON a base alcolica. Il cloro può scolorire il materasso.

Manutenzione

- La manutenzione del compressore deve essere fatto da personale specializzato e autorizzato da:

DEMARTA VIRGINIO SAS
Via Giuseppe Bozzalla n.20
13814 POLLONE (BI) Italy

Tel. (39)015.9555440 fax (39)015.9555441

Info@demarta.com www.demarta.com