

MANUALE D'USO
POLIMED VISCO COMPOSITO LISCIO



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Demarta Virginio. I prodotti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le Vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'articolo da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

AVVERTENZE GENERALI

1. Utilizzare il prodotto nelle modalità indicate da questo manuale. Se persistono dubbi contattare la DEMARTA VIRGINIO SAS.
2. Valutare sempre la compatibilità del prodotto con le caratteristiche del soggetto insieme al medico curante o al terapista.
3. Verificare sempre l'integrità del prodotto prima di ogni utilizzo, anche da nuovo. Non utilizzare se danneggiato o usurato.
4. La DEMARTA VIRGINIO SAS declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti un utilizzo improprio, non concordato con una figura professionale, non corrispondente a quanto indicato sul manuale d'uso.
5. Eventuali incidenti, anomalie, rotture, vanno segnalate alla DEMARTA VIRGINIO SAS al fine di monitorare la qualità e le criticità del prodotto.
6. Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
7. Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
8. Il prodotto è stato progettato solo per l'uso previsto. Non abusarne in alcun modo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La DEMARTA VIRGINIO SAS dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa DEMARTA VIRGINIO SAS è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici.

A tal scopo la DEMARTA VIRGINIO SAS garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

- I dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
- I dispositivi NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
- I dispositivi NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
- I dispositivi vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
- I dispositivi sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.

USO IMPROPRIO

Si intende per uso improprio del prodotto l'utilizzo nelle seguenti condizioni:

- quanto non contemplato specificamente dalle istruzioni;
- mancato rispetto o uso contrario alle Norme di sicurezza vigenti;
- mancato rispetto delle prescrizioni del Produttore;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
- movimentazione e trasporto pazienti;
- in sostituzione di normali materassi o altri sostegni equivalenti;
- in mancanza di specifiche prescrizioni mediche;
- la pulizia con prodotti non idonei;
- la conservazione non idonea.

LIMITAZIONI D'USO

Il prodotto presenta le limitazioni d'uso dovute alla tipologia del materiale, ed alle prescrizioni mediche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Materasso	Misure (cm)	Portata (kg)	Articolo	Codice Fodera	Misure (cm)
05.05.V11958514	195 x 85 x 14	150	Materasso	05.91.1978615	197 x 86 x 15
05.05.V1188514	18 x 85 x 14	150	Prolunga	05.91.198615	19 x 86 x 15

DESCRIZIONE

Il materasso POLIMED VISCO COMPOSITO LISCIO è realizzato con una superficie d'appoggio in espanso viscoelastico con densità 60 Kg/m³ e spessore 6 cm; la base di supporto è in espanso ad alta resilienza di densità 50 Kg/m³ e spessore 8 cm.





L'espanso è realizzato con espansione senza CFC. Confezionato sottovuoto.

Omologato dal Ministero degli Interni Ignifugo classe 1IM. Portata Minima 40 Kg.

Peso del materasso: 13.14 kg.

La fodera è realizzata in **igni Dahlia**, un tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized con cerniera su 3 lati.

PULIZIA

Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Max 95° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
La cover è facile da pulire con acqua e detergente ed è lavabile max a 95°C, disinfettabile e compatibile con i più comuni disinfettanti ospedalieri ad esempio cloroderivati	

MANUTENZIONE

Il prodotto non richiede particolari azioni manutentive, è necessario prestare attenzione ad una corretta pulizia ed a una corretta conservazione come indicato nel presente manuale.

CONSERVAZIONE

Si consiglia, in caso di conservazione per prolungati periodi di tempo, di utilizzare l'imballo di plastica con cui il prodotto viene fornito. Allo scopo di preservarlo dalla polvere e dalla umidità.

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI



In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

GARANZIA

Tutti i prodotti Demarta sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. Demarta non garantisce i prodotti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.