

Sistema Antidecubito Clinical care Manuale d'uso

Il presente manuale fa riferimento ai componenti di seguito elencati che compongono il sistema Clinical care. Dovranno sempre essere utilizzati in combinazione tra loro.

La ringraziamo per aver scelto alcuni dei prodotti di Movi Spa divisione Wimed. Prima di utilizzare il dispositivo qui descritto La preghiamo di leggere attentamente e conservare il presente Manuale d'uso con il relativo certificato di garanzia allegato, provvisto del documento fiscale.

Destinazione d'uso

Il sistema Clinical care è utile per lo scarico dei punti di appoggio del corpo. Indicati per pazienti ad altissimo rischio di sviluppo di piaghe da decubito e senza fratture instabili della colonna vertebrale.

Composto da un compressore e da un materasso sostitutivo ad d'aria, di seguito denominato materasso, deve essere utilizzato appoggiando il materasso direttamente sulla rete del letto e collegandolo al compressore.

Cod. 98.000.05 Sistema Antidecubito Clinical care, costituito da:

Cod. 98.0000.40 Compressore WM80-D

Cod. 98.0000.30 Materasso sostitutivo ad aria XC80

Il Sistema è dotato di due modi operativi:

- ◇ Alternante, le celle si gonfiano e sgonfiano ciclicamente una si ed no
- ◇ Statico, tutte le celle sono gonfie e creano un supporto morbido per ridurre le pressioni di contatto

Il sistema opera con un tempo di ciclo nel modo alternante di 10 minuti. Ciascuna cella si gonfia e sgonfia ogni 5 minuti.


Avvertenze

Il sistema deve essere utilizzato su indicazione medica. Verificare con il personale di assistenza la correttezza delle impostazioni utilizzate.

PERICOLO

- ◇ Non utilizzare in ambienti umidi e nelle vicinanze di vasche ed lavandini.
- ◇ Non immergere o far penetrare liquidi all'interno Non tirare il cavo di alimentazione.
- ◇ Non lasciare esposto ad agenti atmosferici ed in luoghi ad atmosfera esplosiva.
- ◇ Non toccare la spina di alimentazione con mani umide o bagnate.
- ◇ In caso di caduta accidentale dell'apparecchio in acqua prima di estrarlo, togliere la spina della corrente. Una volta estratto, non utilizzarlo ma inviarlo ad un centro autorizzato per la revisione.
- ◇ Utilizzare il sistema lontano da materiali ed agenti chimici infiammabili o sensibili al calore.
- ◇ Non appoggiare al materasso riscaldatori elettrici ed Utilizzarlo solo quando asciutto.
- ◇ Disconnettere il cavo di alimentazione subito dopo l'uso.
- ◇ In caso di danneggiamento del compressore, in qualsiasi sua parte, non utilizzare lo stesso ed inviarlo ad un centro autorizzato per la riparazione.

Installazione ed Utilizzo

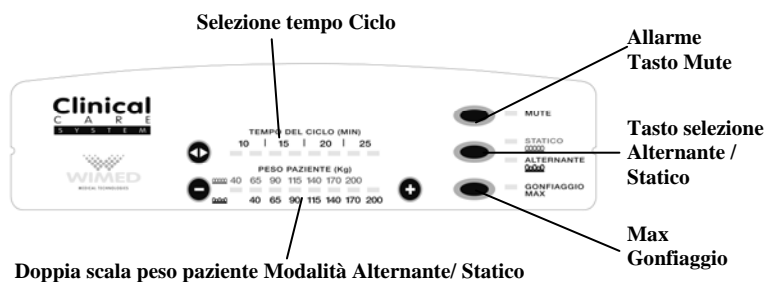

Per installare il sistema seguite attentamente le indicazioni fornite in questo capitolo:

1. Verificare che l'alimentazione elettrica sia compatibile con i dati riportati sul compressore.
2. Collocare il compressore su una superficie piana, oppure utilizzando gli appositi ganci, alla pediera del letto.
3. Verificare che il cavo di alimentazione sia integro e che non venga calpestato o sia d'intralcio.
4. Appoggiare il materasso sulla rete del letto, con i tubi dell'aria situati nei pressi della pompa.
5. Collegare i tubi per l'aria dal materasso al connettore del compressore ed assicuratevi che non abbiano pieghe, tagli o siano attorcigliati impedendo così il flusso dell'aria.
6. Collegare il compressore alla presa di corrente ed accenderlo, posizionando l'interruttore posto sul lato del compressore su "ON".
7. Impostare il peso del paziente agendo sui simboli + e — sino a quando si illuminerà il LED relativo al peso del paziente. Utilizzare la scala pesi relativa alla funzione utilizzata, Alternate o Statico. Attendere 15/20 minuti che il materasso si gonfi completamente.
8. Selezionare il tempo di ciclo.
9. Nel caso venga posizionato un lenzuolo, o se necessario una traversa per incontinenza, sopra il materasso antidecubito evitare di tenderli eccessivamente per non vanificare l'efficacia del sistema.
10. Stendere il paziente e verificare la correttezza della regolazione nel seguente modo: Aprire la cerniera del telo di copertura su di un lato, infilare una mano tra due celle sotto i glutei. La regolazione idonea si ottiene quando vi è uno spazio di 2 dita tra la base del materasso ed i glutei del malato. Per maggior confort la regolazione del peso può essere ridotta se la mano passa confortevolmente sotto il corpo.
11. Per sgonfiare il materasso portare l'interruttore del compressore in posizione "OFF" e disinserire il cavo di alimentazione. Scollegare i tubi e far defluire l'aria.

CPR Il materasso può essere sgonfiato rapidamente per le Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare agendo sul dispositivo di colore rosso posto vicino alla testa del paziente sul lato destro dello stesso. Per attivare tirare la fettuccia con la scritta CPR. Per richiudere: all'interno del materasso, reinserire i due tappi di chiusura posti sulla fettuccia sulle uscite aria dei tubi bianchi (nei modelli con CPR esterna, ripiegare l'anello a semicerchio).

ALLARMI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
Il compressore non funziona	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di rete. 2 Premere e portare l'interruttore d'accensione su "ON". <ul style="list-style-type: none"> ◇ Se l'indicatore dell'interruttore è acceso e la pompa non lavora contattate il servizio assistenza o il rivenditore locale. ◇ Se l'indicatore dell'interruttore è spento provate ad inserire meglio il cavo di alimentazione nella presa di rete o cambiate presa. Se il problema persiste contattate il servizio assistenza o il rivenditore locale.
Allarme Pressione bassa Si attiva un allarme sonoro e visivo. Premere Mute per fermare il sonoro, resta illuminata la spia rossa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che i tubi di connessione possano portare liberamente l'aria al materasso, siano collegati e non siano attorcigliati o piegati. 2 Verificare che il sistema di sgonfiaggio rapido CPR, sia chiuso 3 Verificare che il materasso od i tubi non abbiano fori o perdite d'aria. In questi casi riparare o sostituire.

Materasso Sostitutivo

Il Materasso sostitutivo XC80 è composto da 2 quantità d'aria per aiutare a disperdere l'umidità vestibolari.

Tutte le celle possono essere mantenute sgonfate sgonfiando una cella e inserendo il tappo di chiusura piedi.

Fornito con telo di protezione collegato alla base. L'apertura delle stesse si trova alla estremità del letto.

Manutenzione e Pulizia

Prima di effettuare interventi sul compressore verificare regolarmente l'integrità del sistema.

COMPRESSORE - Pulire l'involucro con un panno morbido inumidito con una soluzione.

- ◇ Non utilizzare detergenti contenenti ipercaloriale.
- ◇ Non utilizzare prodotti spray direttamente sul compressore.
- ◇ Nell'effettuare queste operazioni assicurarsi che il compressore sia spento.

MATERASSO - Può essere pulito, anche con acqua calda e un detergente domestico non abrasivo. Le macchie di sangue copritele con la soluzione pulitrice. Asciugate il materasso all'aria, non alla luce solare. Per l'immagazzinamento arrotolare dopo averlo stesso cospargendo un poco di borotalco. Non lavare. Nel caso il materasso risulti forato o danneggiato.

Nel caso di utilizzo su pazienti diversi, prelevare il materasso.

ETICHETTATURA / LEGENDA DEI SIMBOLI

	Prodotto conforme ai requisiti essenziali del Regolamento Medici 93/42/CEE e s.m.i. compressore
	Codice prodotto
	Pericolo generico
	Codice del lotto di produzione
	Protezione contro i pericoli elettrici doppio isolamento Classe II
	Leggere il manuale prima dell'uso

INFORMAZIONI ALLO SMALTIMENTO

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente con la raccolta differenziata. I prodotti recanti questo simbolo sono rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati alle autorità comunali preposte allo smaltimento. La corretta osservanza di queste contribuisce alla salute umana e sull'ambiente. In caso di danni da D.Lgs 151/2005. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema di smaltimento speciale.

Materasso Sostitutivo

Il Materasso sostitutivo XC80 è composto da 20 celle in PU alte 20 cm. Le otto celle del tronco rilasciano un leggera quantità d'aria per aiutare a disperdere l'umidità cutanea. Le tre celle della testa non alternano onde evitare stimoli vestibolari.

Tutte le celle possono essere mantenute sgonfie permanentemente. Aprire la cerniera lato destro del paziente, sganciare una cella e inserire il tappo di chiusura. I tappi si trovano nella apposita tasca sul lato destro vicino ai piedi.

Fornito con telo di protezione collegato alla base mediante due cerniere che racchiudono i quattro lati. Il punto di apertura delle stesse si trova alla estremità dei piedi.

Manutenzione e Pulizia

Prima di effettuare interventi sul compressore scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica. Verificare regolarmente l'integrità del sistema.

COMPRESSORE - Pulire l'involucro con un panno inumidito con detergente non abrasivo, se molto sporco passare un panno morbido inumidito con una soluzione 1/9 di ammonio quaternario (1 parte + 9 d'acqua).

- ◇ Non utilizzare detergenti contenenti ipercarbonati o fenoli.
- ◇ Non utilizzare prodotti spray direttamente sul dispositivo ma spargete il prodotto su di un panno.
- ◇ Nell'effettuare queste operazioni assicuratevi che non penetrino liquidi all'interno del compressore.

MATERASSO - Può essere pulito, anche lasciandolo sul letto, utilizzando un panno morbido inumidito con acqua calda e un detergente domestico non abrasivo oppure con una soluzione 1/9 di ammonio quaternario. In caso di macchie di sangue copritele con la soluzione per qualche minuto, poi sciacquate.





Asciugate il materasso all'aria, non alla luce solare diretta, e prima di riutilizzarlo verificate che sia asciutto.

Per l'immagazzinamento arrotolare dopo aver fatto defluire tutta l'aria, iniziando dal lato del capo, e ripiegare su se stesso cospargendo un poco di borotalco. Non utilizzare ipercarbonati o fenoli.

Nel caso il materasso risulti forato o danneggiato, sostituire le celle o le parti danneggiate.

Nel caso di utilizzo su pazienti diversi, provvedere sempre a pulire ed igienizzare il sistema.

ETICHETTATURA / LEGENDA DEI SIMBOLI

	Prodotto conforme ai requisiti essenziali del D.Lgs. 46/1997 che recepisce la Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i. compresa la direttiva 2007/47/CE recepita con D.Lgs. 37/2010	
	Codice prodotto	Nome del fabbricante
	Pericolo generico	Anno di fabbricazione
	Codice del lotto di produzione	TÜV Rheinland
	Protezione contro i pericoli elettrici con doppio isolamento Classe II	Parte applicata di tipo BF
	Leggere il manuale prima dell'uso	 Smaltire come rifiuto elettrico

INFORMAZIONI ALLO SMALTIMENTO

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti questo simbolo "smaltire come rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati con i rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. In caso di smaltimento abusivo di tali rifiuti sono previste le sanzioni come da D.Lgs 151/2005.

In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

Dati tecnici

Classe di protezione elettrica compressore e tipologia di parte applicata	- Classe di protezione elettrica: II (doppio isolamento); - Parte applicata di tipo BF;
Alimentazione	AC 230V 50Hz 1A, 12W
Fusibile	AC 250 V ; T1A
Pressione compressore	10~50 mmHg
Cicli di compressione	10, 15, 20, 25 minuti
Portata max terapeutica	200 kg;
Dimensioni / peso / materiale	COMPRESSORE - 28x20x10 cm / 2,6 kg. MATERASSO XC80 20x83x200 cm / 10,5 kg. / PU
Condizioni ambientali	Temperatura - Utilizzo da 10°~ 35° C - Stoccaggio/spedizione da -15 ~ 50°C Umidità - Utilizzo 20~80% - Stoccaggio 10~90%

WM80D Rev. 0 - Cod. 98,0000.XX - 30/11/2010

MOVI SPA Divisione Wimed
Via Dione Cassio 15, 20138 Milano - Italia
wimedinfo@movigroup.com

Manuale d'uso originale

Certificato di Garanzia

La garanzia copre, in tutta Italia, per 24 mesi dalla data di acquisto i difetti di fabbricazione del prodotto, ad esclusione dei materiali soggetti ad usura. L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dal presente Certificato di Garanzia, dallo scontrino fiscale, o fattura, comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato. Durante il periodo di Garanzia Movi S.p.A. provvederà alla sostituzione o alla riparazione delle parti difettose. La Garanzia non copre i danni diretti o indiretti derivanti dal malfunzionamento del prodotto o dal suo mancato utilizzo. La Garanzia offerta dalla Movi S.p.A. non pregiudica i diritti di cui i consumatori sono titolari in base agli articoli 1519 bis-nonies del Codice Civile riguardanti la vendita di beni di consumo.

La Garanzia decade in caso di:

- ◇ Mancanza dello scontrino fiscale o fattura, attestante la data di acquisto.
- ◇ Tentativi di riparazione, o interventi, effettuati da parte di personale non autorizzato.
- ◇ Danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso.
- ◇ Alterazioni del prodotto o delle indicazioni riportate sul Certificato.

Articolo
Difetto riscontrato
.

MOVI S.p.A divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano - www.movigroup.it