



---

**COMODA DOCCIA XXL**  
Manuale d'uso e manutenzione



Prodotto conforme  
**DIRETTIVA 93/42 CEE**  
**AUSILI MEDICI CLASSE I**





## AVVERTENZE

L'ausilio deve essere impiegato solo per la destinazione d'uso per la quale è stato costruito. Non utilizzare l'ausilio per usi diversi o in condizioni ambientali diverse da quelle indicate nel manuale: il mancato rispetto di tali condizioni può causare gravi danni ai meccanismi meccanici o elettrici del ausilio e fa decadere la garanzia.

Kinemed srl declina ogni responsabilità per usi non appropriati dell'ausilio.

- Verificare che il prodotto vi è stato consegnato in perfetto stato prima di qualsiasi utilizzazione.
- In caso di dubbio riguardante le restrizioni di utilizzazione, la regolazione o la manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore.
- Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'ausilio. Tenere questo manuale dove lo si possa consultare ogni qual volta possa essere necessario. Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero essere soggette a modifiche senza l'obbligo, da parte del fornitore, di renderle note.
- La portata massima indicata nelle caratteristiche tecniche e sull'ausilio, non deve essere mai superata/oltrepassata. Utenti di peso maggiore non possono utilizzare questo ausilio.
- Alcuni pazienti in condizioni fisiche gravi potrebbero essere causa di pericolo nell'utilizzo del l'ausilio. Nel dubbio evitare l'utilizzo.
- Non salire mai in piedi sull'ausilio.
- Prestare attenzione su superfici inclinate.
- Non salire o scendere le scale con l'ausilio.
- Non utilizzare l'ausili su tapis roulant.
- L'ausilio è studiato per un singolo utente. Non caricare più persone o oggetti pesanti.
- In caso di guasto/rottura di una qualsiasi parte, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'ausilio e contattare il servizio di assistenza per una richiesta di riparazione.



## ATTENZIONE

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO AUSILIO SIATE SICURI CHE:

- del corretto funzionamento e del bloccaggio di ogni sua parte;
- che l'ausilio raggiunga tutte le posizioni desiderate senza sbloccarsi;
- le parti mobili e regolabili si muovano e si blocchino correttamente, senza intoppi;
- tutte le viti e maniglie siano correttamente bloccate;

### MONTAGGIO

- La sedia arriva già montata e pronta per l'uso, ad eccezione dei poggiapiedi.
- Procedere al montaggio dei poggiapiedi ed all'inserimento su ciascuno dei due supporti sul telaio.
- Inserire il secchio nella sua sede.

### UTILIZZAZIONE

- I braccioli sono estraibili. Per estrarli, premere il pulsante posizionato posteriormente e tirare verso l'alto il bracciolo.
- I poggiapiedi sono regolabili in larghezza. Per regolarli, svitare il pomello sotto la pedana, regolare la larghezza e riavviare.

### Immobilizzazione / trasferimento

- Prima di effettuare un trasferimento, assicurarsi che siano bloccati i 2 freni, che le ruote siano orientate verso il davanti della sedia e che i poggiapiedi siano alzati.
- Non appoggiarsi sui braccioli per un trasferimento.
- Non appoggiarsi mai ai poggiapiedi per sedersi o alzarsi.

## Spostamento

- Non spostare la sedia su delle superfici in discesa o irregolari. Non superare degli ostacoli superiori a 5 mm.
- Non sporgersi in avanti aldilà dell'estremità dei braccioli.
- Non sporgersi all'indietro sopra lo schienale.
- Verificare che nessuna parte del corpo sporga dalla sedia al momento del passaggio attraverso le porte (in particolare al livello dei braccioli).
- Le sedie con servizio wc sono riservate esclusivamente ad un uso interno.



## Dati tecnici

Portata massima	325 kg		
Larghezza del sedile con braccioli standard	61/71 cm		
Larghezza esterna totale con braccioli standard	68/78 cm		
Profondità seduta	56 cm		
Altezza del sedile	55 cm		
Schienale	32-52 cm		
Larghezza del poggiatesta	58-110 cm		
Larghezza tra i braccioli	54 cm		
Altezza dello schienale	48 cm		
Distanza dal pavimento al sedile inferiore	44,5 cm		
Lunghezza totale	117 cm	autospinta	129 cm
Peso totale	27/30 kg		
Ruote anteriori	125 mm		
Ruote posteriori	125 mm	autospinta	24 "

Schiuma PUR schiumata a pressione

Telaio in acciaio al cromo molibdeno verniciato a polveri

I braccioli Butterfly, consentono di allargare lo spazio di accesso alla seduta di 10 cm rispetto alla seduta standard.

Codice	Cod. art.	Descrizione
K60555	0153-061-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG
K60556	0153-071-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG
K50159	0152-061-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG
K50160	0152-071-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG
K60557	0151-061-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG
K60558	0151-071-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG
K00364	0150-061-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG
K20644	0150-071-000	SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG
K50143	0140-999-001	SECCHIO PER SEDIA WC BARIATRICA XXL

Smaltire le diverse componenti differenziando fra loro i materiali secondo la normativa vigente



### **ATTENZIONE**

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO AUSILIO SIATE SICURI CHE:

- del corretto funzionamento e del bloccaggio di ogni sua parte;
- che l'ausilio raggiunga tutte le posizioni desiderate senza sbloccarsi;
- le parti mobili e regolabili si muovano e si blocchino correttamente, senza intoppi;



### **ATTENZIONE**

- l'ausilio deve essere utilizzato su superfici compatte. L'utilizzo su superfici non compatte può compromettere la stabilità di appoggio provocando cadute e lesioni all'utilizzatore
- Usare precauzione nel far procedere il paziente senza accompagnamento
- Prestare particolare attenzione quando si affrontano rampe o discese

## **MANUTENZIONE E CONTROLLI**

### **Pulizia**

Pulire il telaio con un panno umido e con comune prodotto per pulizie. Non usare prodotti a base di solventi e detergenti abrasivi.

### **Manutenzione**

Prima di utilizzare l'ausilio controllare che non vi siano danni visibili. l'ausilio necessita di poca manutenzione, anche se è bene controllare periodicamente lo stato delle parti ed in particolare modo il serraggio delle viti.

Periodicamente e in base alla frequenza di utilizzo, verificare l'usura delle ruote; qualora presentino delle abrasioni o lacerazioni è necessario provvedere immediatamente alla loro sostituzione

Le riparazioni e la manutenzione straordinarie vanno eseguite soltanto dal personale autorizzato e con l'utilizzo di ricambi originali.

---

## **GARANZIA**

I prodotti sono garantiti contro difetti di fabbricazione o di materiale per un durata di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di consegna/acquisto, rilevabile da un regolare documento fiscale (fattura o scontrino).

Questa Garanzia è espressamente limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi (manodopera esclusa) riconosciuti difettosi presso il Costruttore.

Qualsiasi sostituzione potrà essere effettuata con dei pezzi/componenti nuovi oppure riparando le parti, dopo un'attenta valutazione del Costruttore o del suo distributore.

Le spese di spedizione e d'imballo, così come le spese di trasferimento, sono a carico dell'acquirente.

Per l'eventuale rientro della merce è necessario chiedere l'autorizzazione.

La Garanzia si applica a condizione che:

- il prodotto sia riparato presso il Costruttore o un suo distributore
- le manutenzioni periodiche menzionate nel Manuale d'uso siano state svolte regolarmente

Questa Garanzia non potrà essere applicata in caso di:

- incidenti, cadute, urti, uso improprio dell'ausilio
- manutenzione errata o insufficiente
- smontaggio, riparazione o modifiche effettuate da officine non autorizzate
- mancata conservazione della fattura o scontrino che comprovi l'avvenuto acquisto del prodotto

La Garanzia non copre:

- la manutenzione ordinaria, le regolazioni, la programmazione e le verifiche periodiche
- la sostituzione di pezzi sottoposti a normale usura dovuta all'uso dell'ausilio

### **Importata da:**

Kinemed srl - Via Cicogna 8 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) IT

Tel 051 6259708 Fax 051 4999278 mail: info@kinemed.it

### **Prodotta da:**

XXL-Rehab · Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup · Denmark