

## MANUALE D'USO

## SEDIA DA BAGNO PER BIMBO OTTER

### MODALITA' D'USO

La sedia da bagno per bimbo OTTER provvede un adeguato sostegno durante il bagno nella vasca. La seduta, lo schienale e le gambe sono completamente adeguabili all'esigenze dell'utente. Tutti gli aggiustamenti non hanno bisogno dell'utilizzo di attrezzi.

Troverete l'OTTER già assemblato nella confezione. La confezione contiene una sedia per il bagno, il cuscino regolabile a strappo e le cinture per corpo e gambe in Velcro.

L'utilizzo della sedia da bagno Otter è consentito all'interno di vasche o docce (domestiche, ospedaliere o all'interno di strutture assistenziali). L'utilizzo in altri ambienti differenti da questi indicati comporta il venir meno delle condizioni di garanzia ed a lungo andare di quelle di sicurezza del prodotto.

### MANUTENZIONE E CURA

Controllare periodicamente lo stato della sedia. Controllare se ci sono crepe, rotture, parti deboli, pezzi mancanti o malfunzionamenti. Controllare il tessuto vedendo se ci sono segni di usura. Eseguire questi controlli per la sicurezza dell'utente.

Lavare la sedia e il tessuto con sapone e acqua o al massimo 10% di varechina. Non usare prodotti contenenti olio di pino. Il tessuto e le parti in Velcro possono essere rimosse e lavate in lavatrice.

Prima di mettere il tessuto in lavatrice attaccare le parti in Velcro. Il tessuto può essere lavato a freddo e asciugato all'aria. Le parti in Velcro possono essere lavate in acqua calda e asciugate all'aria.

**Attenzione non stirare!**

### PRECAUZIONI

La supervisione degli adulti è richiesta ad ogni uso della sedia per bagno OTTER. Le parti in Velcro e i supporti devono essere attentamente sistemati per il comfort e la sicurezza del bambino. Il bambino deve essere sempre assicurato tramite le cinture in Velcro.

### SISTEMARE LA SEDIA (si veda figura 1)

L'altezza del cuscino per la testa può essere cambiata in base alle esigenze, è sufficiente aprire il Velcro dietro lo schienale e posizionare il cuscino all'altezza desiderata. Una volta posizionato assicurarsi di chiudere bene le due parti del Velcro. Per sistemare la larghezza far scivolare le due parti del cuscino (A) lungo la cintura. Le cinture a strappo possono essere sistemate dove c'è ne bisogno inserendole in qualsiasi anello di tessuto lungo tutta la sedia.

Per sistemare le gambe (E), tirare la barra bianca (F) verso l'esterno spingendole in basso fino a che non sono completamente bloccate. Per cambiare la posizione della seduta, tirare su la barra rossa (G) sotto la seduta (figura 2) spostando il sedile fino alla posizione desiderata. Per cambiare la posizione dello schienale usare la barra rossa (H) dietro lo schienale, tirandola verso l'esterno e spostando lo schienale nella posizione desiderata. (figura 3)

**! ATTENZIONE: le barre rosse (G) ed (H) non devono essere utilizzate dall'assistente per sollevare, spostare la sedia Otter (sia in presenza che in assenza dell'utente)**

Figura 1

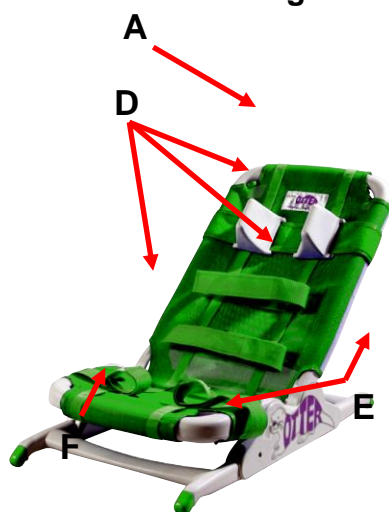


Figura 2



Figura 3



### GARANZIA

La garanzia per la sedia da bagno OTTER è di due anni. La garanzia non copre malfunzionamenti determinati dal cattivo uso del proprietario o dall'utilizzo del prodotto in ambienti non conformi rispetto alla seduta.