

Carrozzina comoda N 35 manuale d'istruzione

Rev: **002**

Data: **08-2014**



CE Dispositivo Medico di Classe I
Direttiva CE 93/42 e smi

Le informazioni contenute in questo documento non dovranno essere riprodotte totalmente o in parte,
né usate per alcun altro scopo che quello per cui esse sono fornite.



KSP[®]
ITALIA

Caratteristiche del prodotto

Materiale del telaio: alluminio

Finitura: verniciato

Crociera: nessuna

Cusino del sedile/schienale: schiuma poliuretanicca, pelle in PVC

Modalità bracciolo: altezza regolabile, estraibile

Equipaggiamento bracciolo: imbottitura del bracciolo in polieuretano

Modalità poggiatesta: estraibile

Modalità rotella anteriore: pneumatico di gomma da 5"

Equipaggiamento rotella posteriore: cerchione in plastica, forcella anteriore in plastica

Modalità ruota posteriore: pneumatico di gomma da 5"

Equipaggiamento ruota posteriore: cerchione in plastica con freno

Altri accessori: secchio di plastica

Componenti del prodotto

1. Pedana
2. Poggiatesta
3. Rotella anteriore
4. Ruota posteriore
5. Telaio
6. Seduta
7. Bracciolo
8. Imbottitura del bracciolo
9. Schienale
10. Secchio in plastica



Istruzioni all'uso

La carrozzina comoda N35 è una carrozzina pratica, stabile, durevole e multifunzionale .

E' adatta per persone con disabilità e per gli anziani con finalità di cura e di trasporto.

Le carrozzine comode sono sostanzialmente assemblate prima della vendita. E' solo necessario procedere con la semplice l'installazione e con la regolazione di alcuni accessori mobili.

1. Controllare il contenuto della scatola per vedere se gli accessori, manuali d'uso, ecc, sono completi. In caso contrario, contattare il venditore o il produttore.

2. Installazione della seduta:

Allineare la fessura sul sedile al tubo orizzontale del telaio. Premere il sedile per fissare il tubo orizzontale nella fessura e assicurarsi che siano saldamente fissati.

3. Uso del secchio:

Posizionare il secchio dal retro della sedia comoda nel canale del sedile. Spingere il secchio al centro del sedile (per la posizione di fissaggio al canale) in questo modo verrà gradualmente bloccato per l'utilizzo.

4. Installazione dei braccioli:

Spostare la chiave di regolazione del bracciolo, mettere il tubo bracciolo nei fori situati su entrambi i lati del telaio della carrozzina, regolare il bracciolo nella posizione idonea e rilasciare la chiave.

Inserire il perno di fissaggio nel foro di fissaggio che si trova sul tubo bracciolo per garantire la posizione del bracciolo.

5. Installazione e regolazione del poggiatesta (pedana):

Allineare ed inserire il perno nel foro del poggiatesta . Ruotare delicatamente il poggiatesta dall'esterno verso l'interno fino a quando sarà fissata la molla. Se è necessario rimuovere il poggiatesta, spingere il blocco della molla dal lato interno del poggiatesta, ruotarlo verso l'esterno fino ad una determinata angolazione ed elevarlo per estrarlo dal perno telaio.

Se è necessario rimuovere il poggiatesta, afferrare la chiave interna del poggiatesta e premere all'indietro. Ruotare il poggiatesta verso l'esterno per una certa angolatura ed elevare per rimuoverlo dal telaio principale.

6.Regolazione Pedana:

Utilizzare la chiave per allentare un pò la vite sulla pedana. Estrarre (o inserire) il tubo interno della pedana e regolare la pedana per il luogo adatto, quindi, stringere la vite con la chiave.

Precauzioni

Uso dei freni.

Quando la carrozzina deve essere fermata e ha bisogno di freni per garantire la sua immobilità, l'utente deve tenere le impugnature dei freni dal lato destro e sinistro con entrambe le mani e spingere in avanti le maniglie dei freni fino a quando non vengono bloccate automaticamente per fermare le ruote posteriori. Per sbloccare i freni, spostare all'indietro le maniglie dei freni

Ruote ad autospinta (Corrimano)

L'utente deve innanzitutto stare stabilmente sulla sedia a rotelle, afferrare i corrimano con le / le mani e spingere i corrimano in avanti con la stessa forza su entrambe le mani per far muovere carrozzina in avanti, quindi allentare entrambe le mani dai corrimano. Quando la carrozzina ha rallentato la sua velocità dopo una certa distanza di movimento, ripetere la procedura di cui sopra.

Raccomandazioni di sicurezza

1. La capacità massima della sedia comoda è di 120kg. Gli utenti oltre 120kg, si pregano di utilizzare con attenzione o contattare il produttore per l'acquisto di prodotti su misura
2. Per la carrozzina ad autospinta, l'utilizzatore dovrà mantenere una velocità uniforme. La velocità consigliata per l'utilizzo dell' autospinta è di 3-5 km / h.
3. La sedia comoda è consigliata per essere utilizzata su terreno pianeggiante. Se compare un ostacolo, si prega di deviare per evitare qualsiasi rischio di sbilanciarsi e cadere.
4. Durante l'utilizzo della carrozzina comoda, l'utente non dovrebbe stare in piedi sul poggiatesta, poiché questo atto causerebbe il rischio di sbilanciarsi e cadere
5. L'utente deve assicurarsi di avere una buona condizione fisica prima di usare la sedia comoda su terreni in pendenza. L'angolo del terreno in pendenza dovrebbe essere non più di 10 gradi per considerazioni di sicurezza.
6. Non inclinare o sterzare mentre la sedia comoda viene utilizzata su terreni in pendenza. L'utilizzo brusco dei freni quando si va in discesa non è raccomandato in quanto questo causerebbe il rischio di sbilanciarsi e cadere in avanti.

Manutenzione

Per mantenere il deambulatore nella sua migliore condizione, procedere con la seguente manutenzione:

1. Prima di usare la sedia comoda e durante il primo mese di utilizzo, controllare che tutte le viti siano strette. Se si verifica una qualsiasi situazione di allentamento, per favore stringere immediatamente per garantire la sicurezza dell'utente. In condizioni di utilizzo normale, procedere con l'ispezione di routine ogni 3 mesi per assicurarsi che tutte le parti siano in buone condizioni e per controllare che tutte le viti e i dadi siano stretti (specialmente i dadi di fissaggio delle ruote posteriori e il sistema frenante).
Se si verifica qualsiasi situazione di allentamento, stringere in tempo.
2. La carrozzina comoda deve essere asciugata dopo l'uso se si bagna nei giorni di pioggia. In condizioni di utilizzo normale, la sedia comoda deve essere pulita spesso con un panno morbido e applicate la cera antiruggine per mantenere la buona condizione di questo prodotto.
3. Mantenere la struttura pulita e asciutta in luogo asciutto e ventilato per evitare la ruggine sulle parti.
4. Controlla spesso l'agilità delle parti rotanti e aggiungere poco lubrificante regolarmente.
5. Evitare qualsiasi contatto di petrolio o acido con le ruote per evitare il deterioramento e mantenere un'adeguata pressione del pneumatico (quando si utilizzano i pneumatici).

Garanzia

La garanzia ha una validità di mesi 24 a decorrere dalla data di consegna all'utilizzatore finale riportata nei documenti di fatturazione e consegna.

L'acquirente o il titolare del contratto di vendita ha tempo due mesi dal momento della scoperta per denunciare il difetto di conformità, la denuncia va fatta per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o telegramma a KSP ITALIA

La garanzia risponde ai requisiti di legge del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.24 attuazione della direttiva 1999/44/CE e paragrafo 1-bis, sezione II capo I titolo III del libro IV del Codice Civile.

Il consumatore è titolare dei diritti previsti dalla legge e la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita, entro termini stabiliti, delle parti componenti dell'apparecchio che, a insindacabile giudizio della Casa Costruttrice, risultassero difettose all'origine per vizi di fabbricazione.



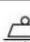





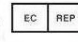

La garanzia non copre le avarie da trasporto (graffi, ammaccature etc...), danni da cadute; danni causati da trascuratezza, manomissione, incapacità d'uso del prodotto e riparazioni effettuate da personale non autorizzato; danni dovuti da errata installazione del prodotto qualora questa venga effettuata direttamente dall'utente o personale non autorizzato, danni causati da alterazioni derivanti da condizioni ambientali e climatiche e tutti i danni causati da fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento.

Un componente sostituito in garanzia, non proroga in nessuna caso la garanzia complessiva del prodotto compresa la parte sostituita.

La presente garanzia non include eventuali spese di manodopera sostenute per i ricambi. In circostanze normali, non ci si assume alcuna responsabilità quando il prodotto necessita ricambi o riparazioni come conseguenza diretta delle seguenti situazioni:

Il prodotto descritto e illustrato nel presente manuale, potrebbe differire in alcuni dettagli dal modello in suo possesso. Tuttavia, tutte le istruzioni sono pertinenti, a prescindere da particolari lievemente differenti. Ci riserviamo il diritto di modificare il prodotto in questo manuale senza obbligo di preavviso.

Etichetta Identificativa

		Portata massima  = 120 Kg  = 136 Kg   	
Codice prodotto	N35 Carrozzina comoda REF JY-761		Fabbricante GUANGDONG SHUNDE JAEYONG HARDWARE CO., LTD. Foshan, Guangdong, China
Data di fabbricazione	 00/00/0000		Numero seriale Wellkang Tech Consulting Suite B, 29 Harley Street, London W1G9QR, UK
			XXXXXXXXXX
Prodotto Importato e Distribuito By KSP ITALIA Srl - www.kspitalia.com			



KSP ITALIA S.r.l.

Via dell'Artigianato, 1
06031 Bevagna (PG) - Italy
Tel. +39 0742 361947
Fax +39 0742 361946

ksp@kspitalia.com
www.kspitalia.com

Prodotto importato
by KSP Italia S.r.l.

