

**SEDIA SEGGIOLONE**

**KID**



**MANUALE  
ISTRUZIONI  
MANUTENZIONE  
SCHEDE TECNICHE**





## TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO SMALTIMENTO

In caso di trasporto di terzi, verificare che sia correttamente protetto con imballo in cartone chiuso e robusto

Durante trasporti a propria cura o nel periodo di magazzinaggio verificare la pulizia di automezzi e locali, eventualmente proteggendo con telo antipolvere

Il prodotto non contiene componenti classificabili come rifiuto speciale all'atto dello smaltimento  
Verificare ed attenersi alle disposizioni locali riguardanti la raccolta differenziata.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Verificare ogni 3 mesi lo stato delle ruote

Controllare ogni 3 mesi ed eventualmente registrare i freni di stazionamento

Controllare ogni 6 mesi il serraggio di viti e bulloni

Controllare ogni 6 mesi ed eventualmente lubrificare le parti in movimento

Sostituire immediatamente parti difettose

Sostituire sedute e schienali che manifestino strappi o inizio di cedimento

Pulizia ordinaria va eseguita con acqua e detergente neutro

Pulizia straordinaria e sanificazione con getto di vapore a bassa pressione

Lavare ed asciugare subito in caso di contatto con sabbia ed acqua di mare

Per eventuali manutenzioni straordinarie rivolgersi alla ditta o al rivenditore autorizzato



## ISTRUZIONI/AVVERTENZE RISCHI GENERICI

La scelta del Dispositivo spetta all'utilizzatore coadiuvato da personale medico-ortopedico.

Le indicazioni contenute in questo manuale devono essere rispettate per evitare danni a cose o persone.

La ditta si riserva di modificare i dati e le dotazioni aggiuntive riportati in questo manuale.

Prima di scendere e salire bloccare i freni

Fare attenzione alle superfici bagnate

Fare attenzione alla esposizione al sole, le superfici potrebbero raggiungere temperature dannose

Non usare i braccioli per sollevare la carrozzina, tantomeno con il paziente seduto

La sedia non può essere utilizzata in posizione seduta all'interno di veicoli

Non salire sulle pedane poggiapiedi per evitare ribaltamento

Non usare la sedia come deambulatore, i freni non sono accessibili e può sfuggire

In caso di trasferimento laterale, avvicinarsi il più possibile, sollevare il bracciolo ed eseguire la operazione rapidamente

Non sporgersi in avanti oltre le ginocchia per evitare ribaltamenti

Evitare movimenti del tronco verso la parte posteriore per non rischiare ribaltamento

In caso di necessità di sporgersi lateralmente, verificare che le ruote piroettanti anteriori siano rivolte verso l'esterno

CND	Y180999
RDM	1162307
ISO	

**54 KID**

18.09.18.003 sedia a seggiolone per bambini e ragazzi  
 seduta scelta larghezza 28-33-37 cm  
 18.09.18.136 altezza seduta regolabile 40-65 cm  
 18.09.18.145 braccioli regolabili profondità-altezza H 18-25 cm  
 seduta profondità 30-35-40 regolabile progressivo  
 18.09.18.127 schienale imbottito regolabile H 30-45 cm  
 4 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno  
 VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1 IM vedi colori  
 ingombro lunghezza 50 cm  
 portata 125 kg



**-R**

versione su base fissa

**+WC**

versione con sedile WC

di serie	ingombro larghezza	peso Kg
seduta 28	38	11,5
seduta 33	42	12,0
seduta 37	47	12,5

**aggiuntivi specifici**

**385RH** 18.09.18.142 pedana unica in alluminio ribaltabile regolabile distanza 28-40 cm

**399** 18.09.18.109 cinturini fermapiedi

**399T** 18.09.18.109 cinturini fermatallon

**316F** 18.09.18.139 fascia poggiapolpacci

**363R** 18.09.18.121 schienale poggiatesta estraibile regolabile H 25-35 cm

**358** 18.09.18.121 poggiatesta regolabile

**368R** 18.09.18.124 poggiatesta ad alette parietali regolabili

**367** 18.09.18.118 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)

**356** 18.09.18.112 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

**398** 12.24.06.127 imbottitura lato interno fiancate

**390** 18.09.18.103 cinghia pettorale imbottita

**391** 18.09.18.106 cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante

**355** 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi

**353** 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx

**IMB** - imbottitura completa tavolo

**IMBR** - imbottitura superiore tavolo rimovibile con strap



colori telaio a scelta rosso-blu-nero-verde-grigio-giallo-bianco



a scelta colori tappezzeria esterno nero-blu-azzurro-verde



a scelta colori tappezzeria esterno rosso-arancione-giallo chiaro-beige



# IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

REF	
CRC-	DESTINAZIONE D'USO
XXXXXXX	descrizione


VEDI  
SCHEDE TECNICHE ORDINE DISPOSITIVO



## ISTRUZIONI PER L'USO SPECIFICHE

## AVVERTENZE E RISCHI

1	freno di stazionamento a pedale integrato su ruota	Azionamento da parte dell'accompagnatore, solo per stazionamento, evitare tassativamente l'uso per rallentamento per evitare blocchi improvvisi e caduta. Bloccare in fase di salita e discesa dalla sedia
2	braccioli regolabili in altezza	Guida scorrevole verticalmente con bloccaggio sul pomello laterale. Verificare che la postura sia conforme alla prescrizione medico-ortopedica
3	regolazione altezza	Svitare le viti il fermo e sfilare l'allungabile in corrispondenza dei fori. Non eccedere per evitare rischi di ribaltamento
4	regolazione profondità seduta	Svitare le viti a brugola, far scorrere e bloccare sulla posizione desiderata. Verificare che la postura sia conforme alla prescrizione medico-ortopedica
5	regolazione altezza schienale	Svitare le viti a brugola, far scorrere e bloccare sulla posizione desiderata. Verificare che la postura sia conforme alla prescrizione medico-ortopedica
6	regolazione altezza prolunga schienale o poggiatesta (opzionale)	Svitare le vite a brugola, far scorrere e bloccare sulla posizione desiderata. Verificare che la postura sia conforme alla prescrizione medico-ortopedica
7	regolazione altezza pedana ribaltabile (opzionale)	Agire sui pomelli di sbloccaggio sulle guide scorrevoli. Posizionare su indicazione medico-ortopedica per mantenere postura corretta. Porre la posizione in posizione verticale prima della discesa. Non salire o scendere sulla pedana

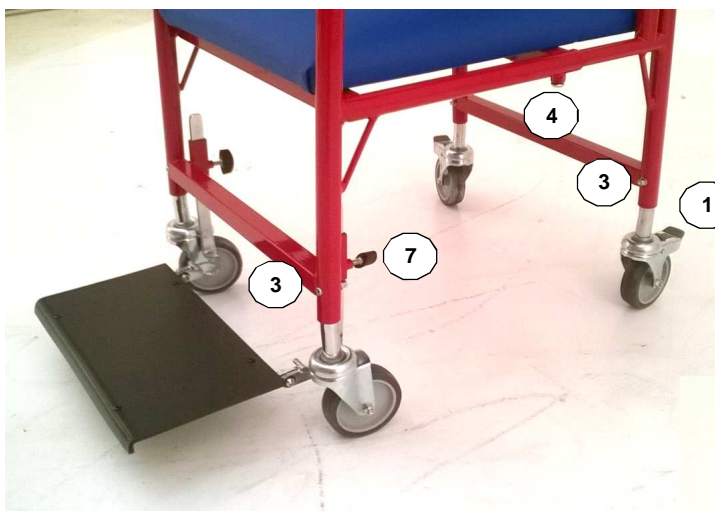



IDENTIFICAZIONE AGGIUNTIVI  
PER OTTENERE COMBINAZIONE SICURA

SED

**SEDUTA**

larghezza profondità altezza

sedile con WC

GAP

**GRUPPI APPOGGIAGAMBE E PEDANE**

pedana ribaltabile

BRA

**BRACCIOLI**

braccioli regolabili in altezza

CRU

**CICLISTICA E RUOTE**

generale verifica tipologia ruote

SCP

**SPINTORI, CUNEI E POGGIATESTA**

cuscinetti di spinta per il tronco

cuneo divaricatore

poggiatesta

TAV

**TAVOLINI**

tavolini ribaltabili

tavolini estraibili

**ISTRUZIONI**

**AVVERTENZE E RISCHI**

Verificare che la postura sia conforme alla prescrizione medico-ortopedica

Posizionare correttante agganci su tubolari telaio laterali. Risciacquare eventuali urine. Mantenere pulita e periodicamente sanificare con vapore la seduta ed il telaio.

Posizionare su indicazione medico-ortopedica per mantenere postura corretta. Porre la posizione in posizione verticale prima della discesa. Non salire o scendere sulla pedana

Guida scorrevole verticalmente con bloccaggio sul pomello laterale. Verificare che la postura sia conforme alla prescrizione medico-ortopedica

Sostituzione di ruote a cura di personale specializzato. Verificare periodicamente lo stato di usura

Regolazione tramite scorrimento nella guida e bloccaggio del volantino. Da utilizzare su prescrizione medico-ortopedica per mantenere postura corretta

Regolazione tramite scorrimento nella guida e bloccaggio del volantino. Da utilizzare su prescrizione medico-ortopedica per mantenere postura corretta

Regolazione tramite scorrimento nella guida e bloccaggio del volantino. Da utilizzare su prescrizione medico-ortopedica per mantenere postura corretta

Installazione rimuovendo il bracciolo originale, posizionando la guida e rimontando il bracciolo. Ribaltare sollevando dal lato opposto alla cerniera. Estrarre sbloccando il pulsante a pressione. Verificare di non provocare schiacciamenti o impedimenti anomali al paziente.

Installazione rimuovendo il bracciolo originale, posizionando la guida e rimontando il bracciolo. Inserimento su guide e regolazione in profondità tramite bloccaggio volantini. Verificare di non provocare schiacciamenti o impedimenti anomali al paziente.



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**relativamente ai prodotti identificati come:  
**SEDIE SEGGIOLONE BAMBINI**

DLG	DIRETTIVA
46/97	93/42/CE
37/10	2007/47/CE



REF
CRC-xxx
54 KID

SEDIA SEGGIOLONE BAMBINI  
e relativi aggiuntivi a costituire sistema kit


+BRA	BRACCIOLI
+SED	SEDILI
+SCP	SPINTORI, CUNEI E POGGIATESTA
+TAV	TAVOLINI
+TAP	TAPPEZZERIE E COLORI PERSONALIZZATI
+ACC	ACCESSORI OPERATORE

Classificati come:

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I - Allegato VII (non sterile e senza funzioni di misura)**

Il sottoscritto Piai Fabio, in qualità di legale rappresentante di PIAI Ortotech srl, con sede in Vittorio Veneto Via Meucci 32, C.F. e P.I. 04193400266, Iscrizione Registro Imprese TV330742, dichiara che i dispositivi descritti sono conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva 2007/47/CE recepita con Dlg 37/2010, attuazione della modifica alla 93/42/CE recepita con Dlg 46/97.

Normativa tecnica di riferimento applicata:

**UNI EN ISO 12182:2001**Vittorio Veneto, ... data (\*)  
Legale Rappresentante  
Piai Fabio(\*) **FACSIMILE**COPIA DOCUMENTI SPECIFICI  
CONSERVATI PRESSO LA SEDE FABBRICANTE  
DISPONIBILI SU RICHIESTA**FABBRICANTE****PIAI ORTOTECH srl**  
Via Meucci 32 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALIA  
tel +390438500884 fax +390438902058**CONDIZIONI DI GARANZIA**

La presente garanzia copre in tutta Italia per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto qualsiasi difetto relativo a progettazione, materiali, fabbricazione ed assemblaggio, escludendo da ogni garanzia i danni causati da usura, manomissione od uso improprio.

Il prodotto difettoso dovrà essere accompagnato da una copia delle presenti Condizioni di Garanzia unitamente ad un giustificativo a comprovare la data di acquisto e la Scheda ANALISI DIFETTOSITA' sottostante.

La garanzia decade in mancanza di comprovante data di acquisto, tentativi di riparazione non autorizzati, danni causati da eventi accidentali, non osservanza delle istruzioni od avvertenze riportate nel manuale d'uso.

**ANALISI DIFETTOSITA PER EVENTUALE INOLTRO:****ARTICOLO REF:****AGGIUNTIVI****DIFETTO RISCONTRATO:****DITTA RICHIEDENTE****COMPROVANTE ACQUISTO**

Ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy informiamo che i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'assistenza tecnica