



TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SANITÀ

FERENTINO

EYE-D

Videolngranditore Portatile

Manuale Utente
Versione 1.0 - Italiano

Aumed
Seeing is Believing

Eye-D

Manuale Utente

Versione 1.0 (Italiano)

Copyright 2014 by Aumed,

Tutti i diritti riservati



Aumed Group Corp.

Suite 712, Huakong Bldg3; Shangdi Eastroad, No 1;
Haidian District, Beijing, 100085

Tel: 86-10-59790095 Fax: 86-10-51413581

Email: sales@umed.cn support@umed.cn

Website: www.umedgroup.com

www.umed.cn

Sommario

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Introduzione..... | - 3 - |
| Informazioni su questo manuale | - 3 - |
| 2. Sicurezza e cura..... | - 4 - |
| 4. Imparare a conoscere Eye-D..... | - 7 - |
| 5. Guida introduttiva | - 8 - |
| Power On / Off | - 8 - |
| Regolazione ingrandimento | - 8 - |
| Modalità di contrasto..... | - 8 - |
| Fermo immagine | - 9 - |
| Impostazione Luminosità..... | - 10 - |
| Funzione di Memorizzazione | - 11 - |
| Funzione TV-Out | - 11 - |
| Auto Power Off | - 12 - |
| Stand per la scrittura | - 12 - |
| Indicatore Batteria | - 13 - |
| 6. Conformità | - 14 - |
| 7. Specifiche Tecniche..... | - 15 - |
| 8. Garanzia | - 16 - |

1. Introduzione

Congratulazioni per aver scelto **Eye-D**, un video ingranditore portatile prodotto da Aumed. Utilizzare Eye-D per la lettura, la scrittura, visualizzazione di mappe, foto, consigli, ecc.

Se avete domande e/o suggerimenti sul funzionamento di questo prodotto, si prega di contattare la T.S.S. S.r.l. in qualità di distributore di riferimento per il mercato italiano. Your feedback is greatly appreciated. We hope you enjoy using your Image Portable Video Magnifier. Our global website: www.aumedgroup.com

Informazioni su questo manuale

Questo manuale fornisce una guida completa sulle caratteristiche tecniche e sul funzionamento del video ingranditore portatile Eye-D. Le immagini contenute in questo manuale potrebbero differire dalla situazione reale. Il produttore Aumed Corporation si riserva tutti i diritti per l'interpretazione di tutti i contenuti in questo manuale.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'Eye-D e mantenere il manuale utente in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Si prega di utilizzare solo componenti originali Aumed.

2. Sicurezza e cura

1. Prima dell'uso, si prega di controllare che l'Eye-D non sia danneggiato, in caso affermativo, si prega di contattare la T.S.S. S.r.l., non tentare di ripararlo da soli.
2. Per ottimizzare la durata della batteria, si prega di utilizzare più batterie ricaricabili NI-MH AA da 2500mAh, o si possono utilizzare normali batterie AA, si prega di utilizzare le batterie AA secondo le istruzioni.
3. Non esporre l'Eye-D a repentini sbalzi di temperature o umidità.
4. Non collocare l'Eye-D in prossimità di radiatori o sistemi di riscaldamento, o dove possa essere esposto alla luce solare diretta.
5. Maneggiare con cura l'Eye-D. Maneggiare con delicatezza per evitare di danneggiare i componenti interni.
6. Non rimuovere alcun component dell'Eye-D. Contattare la T.S.S. S.r.l., se necessario.
7. Non aprire uno qualsiasi dei component dell'Eye-D per evitare di invalidare la garanzia. La riparazione di qualsiasi componente deve essere effettuata da un tecnico autorizzato Aumed.
8. Non utilizzare detergenti o materiali abrasive per non danneggiare l'unità. Evitare di toccare la lente della telecamera.

9. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.
10. Non colpire, far vibrare, scuotere con forza o far cadere il video ingranditore.
11. Non utilizzare l'alimentatore in dotazione per caricare le batterie monouso.
12. Si prega di caricare le batterie per il primo utilizzo.
13. Per prolungarne la durata, rimuovere le batterie dall'Eye-D se il sistema non viene utilizzato per una settimana o più.
14. Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
15. Si prega di far riferimento anche alle altre istruzioni relative all'uso della batteria.
16. Nel caso di utilizzo da parte di bambini, è consigliabile un tutor per offrire adeguate istruzioni per il video ingranditore per evitare eventuali incidenti.

L'utilizzo dell'Eye-D diverso da quello descritto nel presente manuale utente può escluderlo dalle condizioni di garanzia.

3. Contenuto della confezione

La confezione dell'Eye-D contiene:




- ① Il video ingranditore portatile **Eye-D**
- ② Un caricabatteria
- ③ Cavo per la connessione alla TV
- ④ Custodia in pelle
- ⑤ Panno per la pulizia della telecamera
- ⑥ Manuale utente
- ⑦ Due batterie ricaricabili tipo AA NiMH già inserite all'interno del video ingranditore

Contattare la T.S.S. S.r.l. se nella vostra confezione manca uno degli oggetti elencati.

NOTA: Tutte le immagini in questo manuale sono puramente indicative.

4. Imparare a conoscere Eye-D

La figura seguente mostra i componenti principali di Eye-D.

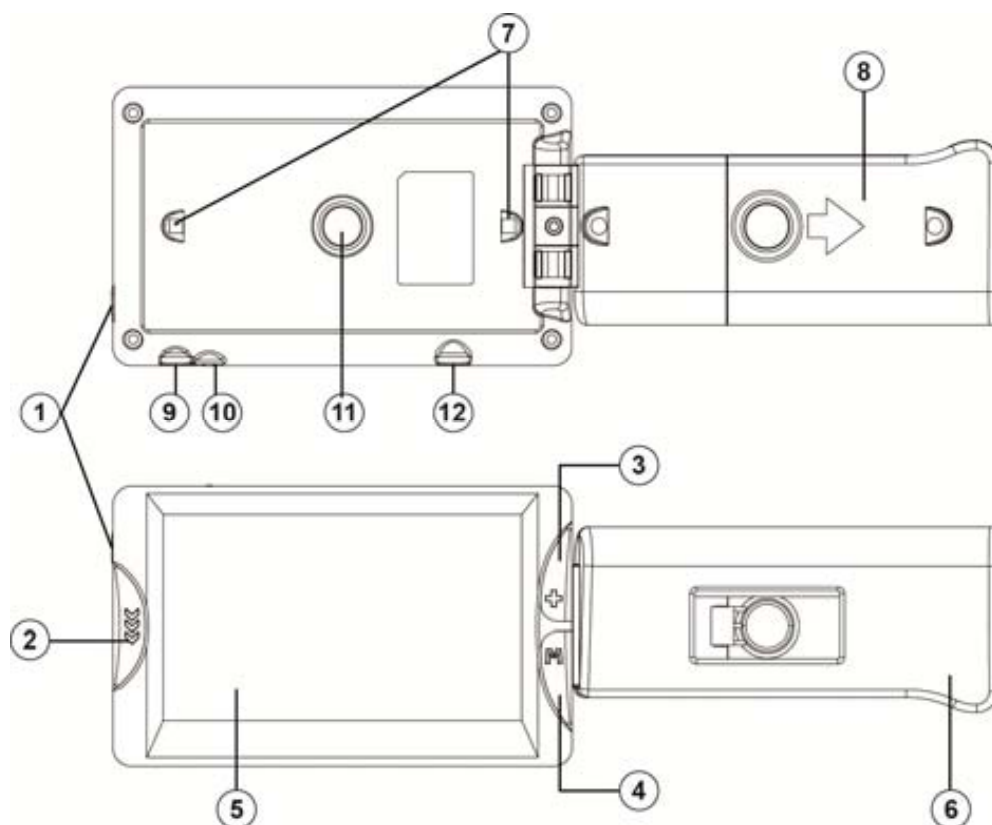

① On/Off e fermo immagine

② Modalità di contrasto

③ Pulsante Zoom +

④ Pulsante Zoom -

⑤ Schermo LCD

⑥ Folding Handle

⑦ LED Ausiliario

⑧ Compartimento batterie

⑨ DC In

⑩ Indicatore batteria

⑪ Telecamera integrata

⑫ Uscita TV

5. Guida introduttiva

Power On / Off

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi per accendere l'Eye-D.

Premere e tenere premuto nuovamente per spegnere il dispositivo.

Regolazione ingrandimento

Premere il pulsante dello zoom per ingrandire le dimensioni dell'immagine.

- a) Aprire la maniglia, premere il pulsante dello zoom per ottenere intervalli di ingrandimento da 1.5X ~ 38X.
- b) Con l'impugnatura ripiegata, premere il pulsante dello zoom per ottenere livelli di ingrandimento da 4,5x a 38x.
- c) L'ingrandimento può anche essere modificato regolando la distanza tra la fotocamera e gli oggetti di destinazione.

Modalità di contrasto

L'Eye-D possiede 7 diverse modalità di contrasto preimpostate. Premete il pulsante modalità di contrasto per

cambiarle in sequenza:

- (1) Modalità a colori
- (2) Scala di grigi
- (3) Nero su bianco
- (4) Bianco su nero
- (5) Blu su bianco
- (6) Bianco su Blu
- (7) Giallo su nero

Oltre queste 7 predefinite, l'Eye-D fornisce altre 7 modalità di contrasto che possono essere personalizzate dall'utente premendo il pulsante Zoom – e il pulsante modalità di contrasto, così da ottenere 14 diverse modalità; per tornare alle 7 modalità di contrasto premere nuovamente i pulsanti zoom – e modalità di contrasto.


Fermo immagine

- Premere il pulsante on/off per ottenere un fermo immagine;

- Premere di nuovo il pulsante on/off per uscire dalla modalità fermo immagine.
- Quando l'immagine è bloccata, la luce si spegne automaticamente per risparmiare energia.
- In modalità fermo immagine, l'ingrandimento e la modalità di visualizzazione possono essere regolati per le vostre esigenze

Impostazione Luminosità

- Premere e tener premuto il pulsante modalità per circa 3 secondi, lo schermo LCD visualizzerà la “barra di stato luminosità”, come da figura in basso. Si possono impostare fino a 6 livelli di luminosità. Premere il pulsante ingrandimento per aumentare la luminosità, premere il pulsante modalità per diminuirla.
- Per uscire dalla modalità di regolazione, premere il pulsante modalità per circa 3 secondi.

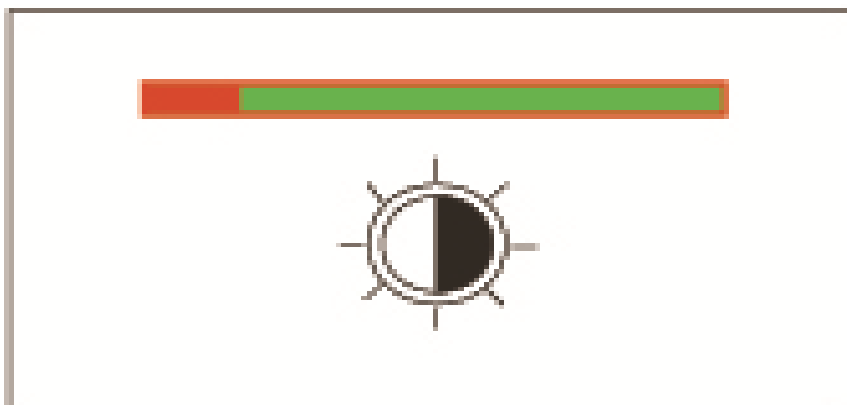

Nota: Massima luminosità come impostazione predefinita.

Funzione di Memorizzazione

L'Eye-D memorizza automaticamente le impostazioni di: ingrandimento, modalità di contrasto e luminosità dall'ultimo spegnimento.

Funzione TV-Out

Collegare la TV e l'Eye-D con il cavo TV-out in dotazione, e quindi cambiare la modalità del televisore in modalità AV. Lo schermo del video ingranditore verrà automaticamente spento durante la connessione alla TV per il risparmio energetico.

Auto Power Off

L'Eye-D ha la funzione di spegnimento automatico.

Durante il suo normale utilizzo, se non viene effettuata alcuna operazione entro 3 minuti circa, il video ingranditore si spegne automaticamente.

Stand per la scrittura

L'Eye-D ha due posizioni per la scrittura:

- I. Aprire la maniglia a 90°, sollevare l'Eye-D verticalmente per la scrittura;



- II. Aprire totalmente la maniglia e tenere l'Eye-D come una lente d'ingrandimento durante il processo di scrittura.



È possibile cambiare la modalità di contrasto, di ingrandimento, o addirittura bloccare l'immagine durante la scrittura.

Indicatore Batteria

L'indicatore della batteria () apparirà sul display per circa 10 secondi non appena l'Eye-D verrà acceso.

L'indicatore di alimentazione si trova proprio accanto alla porta di ricarica “DC 5V”.

Fare riferimento alle seguenti indicazioni per avere informazioni sul significato della spia di alimentazione:

- Rosso lampeggiante: le batterie devono essere ricaricate
- Rosso: in carica.

— Verde: batteria completamente carica.

6. Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza delle direttive:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CE: | FCC: |
| EN 55022: 2010 EN 55024 : 2010 | FCC part 15 class B |



Questo dispositivo reca il marchio CE e l'approvazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento

Ausilio visivo con maniglia obliqua pieghevole.

7. Specifiche Tecniche

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello | Eye-D |
| Grazndezza LCD | 4.3" TFT LCD |
| ingrandimento | 1.5x – 38x |
| Modalità di contrasto | 7 modalità colore |
| Fermo Immagine | Sì |
| Ingrandimento e contrasto modificabili durante il fermo immagine | Sì |
| Supporto scrittura | Sì |
| Risparmio Energatico | Sì |
| Spatial Resolution | 3 times magnification can resolve a target consisting of line pairs measuring not more than 0.233 mm per pair (0.116 mm per element) |
| Luminosità Display | 300cd/m² |
| Dimensioni | 238 x 76 x 17.5 mm. |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| | (124 x 76 x 39 mm con maniglia chiusa) |
| Peso netto | 217 g |
| Condizioni di esercizio | |
| Temperatura | 0°C to 40°C |
| Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |
| Temperatura | -5°C to 50°C |

8. Garanzia

Aumed offre garanzia limitata di due anni dalla data di acquisto: si prega di tenere sempre la ricevuta di acquisto in un luogo sicuro, e di esibirla per i diritti di garanzia.

- A discrezione, Aumed riparerà o sostituirà il dispositivo senza costi aggiuntivi se il problema è causato da difetti (con uso normale).
- La nostra garanzia non copre (per gli altri termini e condizioni, si rimanda alla sicurezza e cura):
 - danni intenzionali o danni causati da un eccesso di forza fisica.
 - danni dovuti a un utilizzo del dispositivo in

condizioni estreme (ad esempio sotto calore eccessivo) o diverso da quanto indicato sulle istruzioni (ad esempio con un adattatore di alimentazione non corretta).

- graffi e macchie di normale utilizzo.

Per ottenere un servizio migliore, si prega di contattare il distributore Aumed locale con la prova di acquisto o mandaci una email a assistenza@tssortopedia.it, le vostre richieste saranno evase entro 48 ore.

Distributore Aumed:



T.S.S. S.r.l. Unipersonale
Via Casilina Sud km 77,100
03013 FERENTINO (FR)

Tel: 0775.271470 – fax 0775.244064

email: computer@tssortopedia.it
assistenza@tssortopedia.it